

# ceramco<sup>®</sup>IC



## Ceramco iC – informacja

### Zastosowanie

Ceramiką Ceramco iC licujemy prace różnego rodzaju. Oprócz uzupełnień metalowych licowanych techniką warstwowania, bardzo często prasowane są estetycznie wysokiej jakości prace protetyczne. Od kilku lat wykonywane są także pełnoanatomiczne korony i mosty techniką natłaczania na strukturę metalową.

### System ceramiki Ceramco iC przewidziany jest:

1. do użytkowania jako konwencjonalna ceramika metalowa do licowania struktur koron i mostów ze stopów szlachetnych i nieszlachetnych.
2. do natłaczania na metalowe struktury koron i mostów
3. jako ceramika prasowana: do wykonywania licówek, wkładów, nakładów, koron pełnoceramicznych w obszarze zębów przednich i bocznych do 2. przedtrzonowca włącznie.

### Przeciwwskazania

Ceramika jest przeznaczona tylko i wyłącznie do wyżej wymienionych celów, wskazań,

### Wybór stopu

Ceramco iC jest kompatybilne ze stopami o wysokiej i zredukowanej zawartości metali szlachetnych oraz ze stopami nieszlachetnymi. Współczynnik rozszerzalności termicznej używanego stopu powinien zawierać się w przedziale pomiędzy 14,0 - 14,6, przy 500°C. Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi producenta stopu dentystycznego, którego chcemy użyć, zwrócić uwagę na skład stopu i jego rozszerzalność. Ceramco iC jest odporne na przebarwienia w kontakcie ze stopami zawierającymi srebro. Jednakże używanie takich stopów zobowiązuje do regularnego czyszczenia pieca do wypalania ceramiki oraz sztyftów/ pinów, na których była zawieszona praca.